

**vemos un camino a seguir.**



**canvas Dx™**  
by cognoa

Saber es la intervención más temprana



“

*Canvas Dx fue un milagro para nuestra familia porque pudimos actuar de inmediato. Otras familias que conozco debieron recurrir a varios médicos para encontrar una respuesta a sus inquietudes, y eso les llevó una eternidad. Estoy muy agradecida de que nuestro pediatra estuviese informado sobre Canvas Dx. Nuestro hijo está progresando muy bien.*

*– Madre de un niño de cuatro años*

## Cuando le preocupa el desarrollo de su hijo, cada minuto cuenta.

La infancia temprana constituye uno de los períodos de mayor crecimiento y desarrollo cerebral: cada segundo, se crean y moldean más de un millón de conexiones neuronales nuevas. En esta etapa crítica, las intervenciones y el apoyo adecuados pueden cambiarle la vida a un niño.

Pero el proceso para determinar si el niño posee una afección o un retraso en el desarrollo, como autismo, puede tardar meses e incluso años, lo que implica numerosas visitas médicas y largos períodos de espera para recibir un diagnóstico.

Con Canvas Dx, usted y su médico pueden avanzar de manera más rápida, fácil e inteligente. **Juntos.**



**canvas Dx**<sup>TM</sup>  
by cognoa

**Canvas Dx es el primer y único sistema de diagnóstico autorizado por la Administración de Alimentos Medicamentos (FDA) que ayuda al médico a confirmar o descartar el diagnóstico de autismo en niños de entre 1.5 y 6 años.**

## Canvas Dx es simple. Solo necesita un teléfono inteligente.



Una vez que el médico haya recetado Canvas Dx, descargue la aplicación desde App Store o Google Play e ingrese el código de acceso único que recibió por correo electrónico. Utilice la aplicación Canvas Dx para realizar lo siguiente:



Responder preguntas de opción múltiple breves sobre el niño. Esta tarea le llevará menos de 10 minutos.



Cargar dos vídeos cortos que muestren el comportamiento natural del niño al momento de jugar. Nuestros especialistas en desarrollo infantil revisarán los vídeos para observar y entender el comportamiento natural del niño.



Por su parte, el médico también responderá preguntas sobre el comportamiento y el desarrollo del niño.

**Canvas Dx y su médico se ocuparán del resto.** Canvas Dx integra esta información y genera un resultado que el médico utilizará para confirmar o descartar un posible diagnóstico de autismo y definir los próximos pasos.



*Haga clic o escanee el código QR para descargar la aplicación Canvas Dx*





## Sugerencias útiles para grabar vídeos estupendos en casa

- ✓ Asegúrese de incluir interacciones con el niño. Por ejemplo, pregúntele cuál es su asignatura o juguete favorito.
- ✓ Procure que las manos y el rostro del niño se vean en el vídeo lo máximo posible.
- ✓ Grabe en un espacio tranquilo, bien iluminado y sin ruido de fondo para que podamos ver y escuchar al niño con claridad.
- ✓ Los videos deben durar al menos 1 minuto y 30 segundos o más.

*Escanee el código QR a continuación para obtener más consejos de grabación:*



# Qué esperar de los resultados de Canvas Dx

Canvas Dx utiliza tecnología de IA basada en datos de miles de niños diferentes que tienen autismo o que pueden tener este trastorno u otras afecciones del desarrollo para arrojar un resultado positivo o negativo para autismo con suma precisión. El médico utiliza el resultado de Canvas Dx para confirmar o descartar un posible diagnóstico de autismo. Canvas Dx arroja uno de los siguientes tres resultados: **Positivo para autismo, Negativo para autismo e Indeterminado.**

## ¿Qué significa el resultado Positivo para autismo?

Un resultado positivo indica que existe una alta probabilidad de que el niño tenga autismo. El médico trabajará con usted para determinar la asistencia y las terapias adecuadas para el niño. Nosotros brindaremos la ayuda que sea necesaria.

## ¿Qué significa el resultado Negativo para autismo?

Un resultado negativo indica que existe una alta probabilidad de que el niño NO tenga autismo. Según el criterio clínico del médico, es posible que se requiera una evaluación o un monitoreo continuos de afecciones no relacionadas con el autismo.

## ¿Qué significa el resultado “indeterminado”?

En este caso, Canvas Dx no puede brindar una respuesta definitiva. En general, los médicos indican evaluaciones adicionales para los niños que reciben un resultado indeterminado. Este resultado NO significa que hubo una falla técnica o que debe volver a hacer lo que envió. Canvas Dx se abstiene intencionalmente de realizar una predicción negativa o positiva en los casos en los que la información no es suficiente. Esta es una función de seguridad importante que permite reducir el riesgo de realizar predicciones falsas, por lo que usted puede confiar plenamente en la exactitud del resultado positivo o negativo de Canvas Dx.

**Alto nivel de exactitud. Clínicamente probado. Diez años de investigación y desarrollo:** En estudios y evaluaciones clínicas, Canvas Dx registró un valor predictivo positivo (VPP) de 88 % y un valor predictivo negativo (VPN) de 96 %. Canvas Dx arroja un resultado positivo o negativo en el 67 % de los casos.

**Comience a utilizar Canvas Dx hoy mismo. Obtenga esta información lo antes posible, para poder actuar con rapidez.**

# Un diagnóstico no es una etiqueta. Es una oportunidad para abrirle las puertas del mundo al niño.

*Antes de recibir el diagnóstico de nuestro hijo, mi esposo decía que no era nada, que ya se le pasaría. Pero ahora sabe y entiende cuán frustrante fue para mí ver a nuestro hijo así y querer ayudarlo. Sabía que mis inquietudes eran válidas, y estamos felices de haber recibido la ayuda que necesitábamos.*

– Cuidadora de un niño con diagnóstico de autismo



Estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino.

Llámenos al 1-866-426-4662 | [Escríbanos a support@cognoa.com](mailto:support@cognoa.com) | [Visite www.Cognoa.com](http://www.Cognoa.com)

Fundamos nuestra compañía, Cognoa, porque sentimos pasión por el desarrollo y la salud conductual de los niños. Brindamos asistencia a proveedores de atención médica y familias que tienen inquietudes, que no saben qué hacer, o que están atascados en listas de espera interminables para obtener respuestas. Creemos que cada niño y cada familia merece acceso igualitario a un diagnóstico temprano y a la atención. Creemos que los proveedores deben contar con las herramientas necesarias para resolver con confianza las inquietudes que se presentan. Nos comprometemos a crear estas oportunidades.





## Comience a utilizar Canvas Dx hoy mismo.

Obtenga esta información lo antes posible, para poder actuar con rapidez.

### Mire este vídeo breve sobre cómo funciona Canvas Dx

*Escanee el código QR con su dispositivo móvil*



Llámenos al 1-866-426-4662 | [Escríbanos a support@cognoa.com](mailto:support@cognoa.com) | [Visite www.Cognoa.com](http://www.Cognoa.com)

#### Indicaciones para el uso de Canvas Dx

Canvas Dx ha sido diseñado para ser utilizado por proveedores de atención médica como una herramienta de asistencia para el diagnóstico de trastornos del espectro autista (TEA) en pacientes de entre 18 y 72 meses que estén en riesgo de presentar retrasos en el desarrollo según las inquietudes manifestadas por los padres, cuidadores o proveedores de atención médica. Este dispositivo no debe utilizarse como una herramienta de diagnóstico independiente, sino como un complemento al proceso de diagnóstico. El dispositivo se utiliza únicamente con receta. Para acceder a la descripción completa de las indicaciones para su uso, precauciones, advertencias y contraindicaciones, visite [www.Cognoa.com/IFU](http://www.Cognoa.com/IFU).