

¿Tiene inquietudes sobre el desarrollo o el comportamiento de su hijo? ¿Sospecha que ocurre algo más? ¿O simplemente no está seguro de si debería preocuparse?

Tenemos un camino a seguir.




canvas Dx
by cog'noa

Saber es la intervención más temprana


En el desarrollo infantil y la salud conductual, la anticipación lo es todo.

En la primera infancia, se forman más de 1 millón de conexiones neuronales por cada segundo. Durante estos años críticos, las intervenciones y el apoyo adecuados pueden cambiar la vida.

Pero el proceso para evaluar a su hijo por retrasos en el desarrollo o condiciones como el autismo puede tomar meses – incluso años. Esto puede significar muchas citas con diferentes médicos o largos tiempos de espera para obtener un diagnóstico y el apoyo que su hijo necesita.

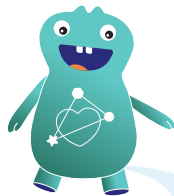

Con Canvas Dx, tú y tu médico están en el centro de una forma más rápida, fácil e inteligente de avanzar. Juntos.

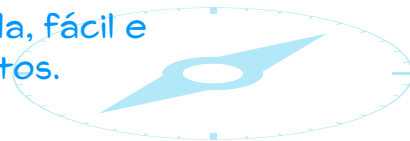

Canvas Dx es una evaluación digital que los médicos utilizan para:

- Comprender mejor las fortalezas y desafíos del desarrollo de su hijo
- Diagnosticar o descartar el autismo*
- Activar los pasos correctos a seguir y el apoyo

*Canvas Dx utiliza IA clínicamente validada y entrenada con datos de miles de niños diversos en riesgo y con autismo, así como otras condiciones de desarrollo. Es altamente precisa, ha sido probada en estudios clínicos y la FDA la autorizó para los niños de 18 meses a 6 años con problemas de desarrollo.

Obtén un diagnóstico y los siguientes pasos para tu hijo - *en días.*

Tome medidas anticipadas sobre los problemas de desarrollo, para que su hijo pueda beneficiarse de las intervenciones y las ayudas anticipadas

Después de que su médico le prescriba Canvas Dx, descargue la aplicación Canvas Dx desde la App Store o Google Play e ingrese el código de acceso único que se le envió por correo electrónico. Utilizando nuestra aplicación en la comodidad de su hogar:



Responda algunas preguntas de opción múltiple sobre su hijo.

Esto le tomará menos de 10 minutos.



Sube dos videos cortos de su hijo durante el tiempo de juego habitual.


Nuestros expertos en el desarrollo infantil revisan estos videos para observar y comprender el comportamiento natural de su hijo. Vea los consejos a continuación.



Por separado, su médico también responde a preguntas sobre el comportamiento y el desarrollo de su hijo.



Canvas Dx y su médico hacen el resto. Canvas Dx combina esta información y produce un resultado y un informe detallado que su médico utiliza para informar un diagnóstico y activar los siguientes pasos.

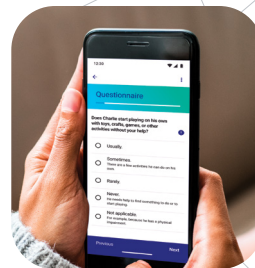

Español



Inglés

Consejos útiles para grabar videos



Empieza a utilizar Canvas Dx hoy mismo.

Conozca más antes, para que puedas actuar pronto.



Mira cómo funciona Canvas Dx

“

Canvas Dx fue un milagro para nuestra familia porque pudimos actuar de inmediato. Las otras familias que conozco tuvieron que ir de médico en médico para llegar al fondo de sus problemas, y tardaron una eternidad. Estoy muy agradecida de que nuestro pediatra supiera sobre Canvas Dx. Nuestro hijo está progresando bien.

– Madre de un niño de 4 años



Indicaciones de Uso de Canvas Dx

Canvas Dx está destinado a ser utilizado por proveedores de atención médica como una ayuda para el diagnóstico del trastorno del espectro autista (TEA) en pacientes de 18 a 72 meses de edad que estén en riesgo de presentar retrasos en el desarrollo, basándose en las inquietudes manifestadas por un padre, un cuidador o un proveedor de atención médica. El dispositivo no está destinado a ser utilizado como un dispositivo de diagnóstico independiente, sino como un complemento al proceso de diagnóstico. El dispositivo sólo puede utilizarse con prescripción. Para conocer todas las indicaciones de uso, precauciones, advertencias y contraindicaciones, visite www.cognoa.com/IFU.

LBL-033 Ver. 2

support@cognoa.com | www.cognoa.com